

TUTORIEL SMYLCHECK





SMYLCHECK MOBILE


- Connexion
- Espace Commandes SMYLINE
- Création d'un cas d'aligneurs
- Page SMYLCHECK
- Identification du patient et définition des objectifs du plan de traitement
- Espace de prise de photos intraorales
- Déclenchement du SMYLCHECK
- Résultat du SMYLCHECK
- Validation du SMYLCHECK

CONNEXION

Pour accéder au SMYLCHECK, vous devez vous connecter à votre espace SMYLINE

- Votre distributeur est LYRA ETK : connectez-vous avec votre navigateur Chrome ou Safari à votre portail « Dental App » : <https://portal.lyraetk.com/>
- Votre distributeur est GACD/Prodentalpes ou DentalAddict : connectez-vous avec votre navigateur Chrome ou Safari à votre portail « Track » : <https://app.track.dental/>

Dans les deux cas, un code de confirmation envoyé par email peut vous être demandé.

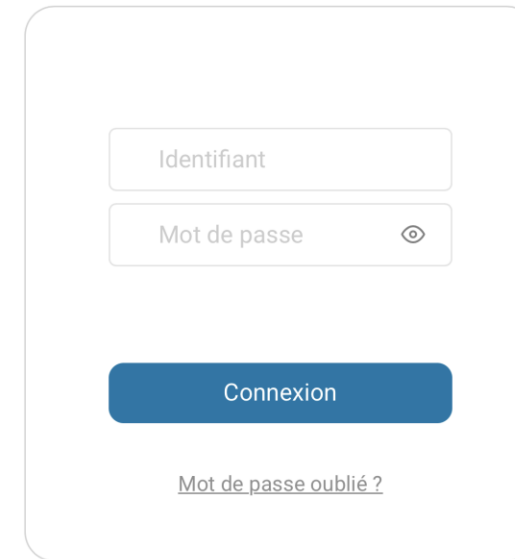


A mockup of a login form displayed on a mobile device screen. The form is contained within a light gray rounded rectangle. It features two input fields: the first is labeled 'Identifiant' and the second is labeled 'Mot de passe' with an eye icon to its right. Below these fields is a blue button with the text 'Connexion'. At the bottom of the form, there is a link that reads 'Mot de passe oublié ?'.

ESPACE COMMANDES SMYLINE

Lorsque vous vous connectez, vous accédez directement à votre espace de commandes SMYLINE.


Vous pouvez consulter les cas en cours.

Vous pouvez aussi créer un nouveau cas SMYLINE avec un SMYLCHECK en cliquant sur l'icone **+** présentée en haut à droite

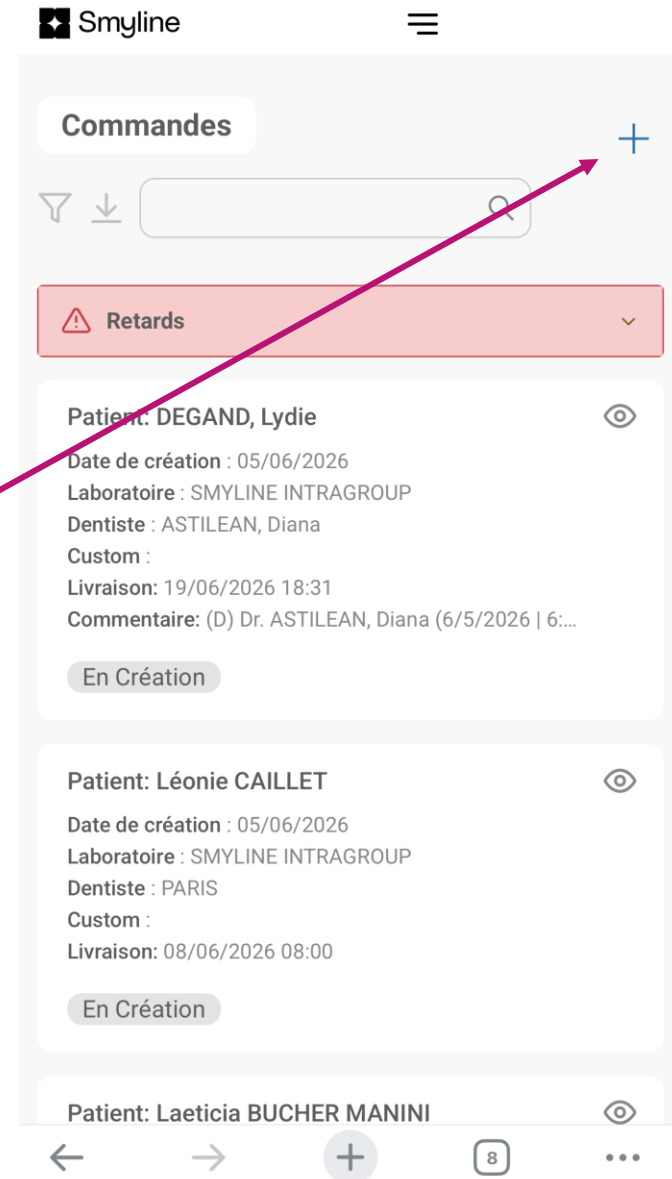

CREATION D'UN CAS D'ALIGNEURS

Après avoir cliqué sur + , vous choisissez l'option « Aligneurs SMYLINE » pour évaluer un plan de traitement avec le SMYLCHECK

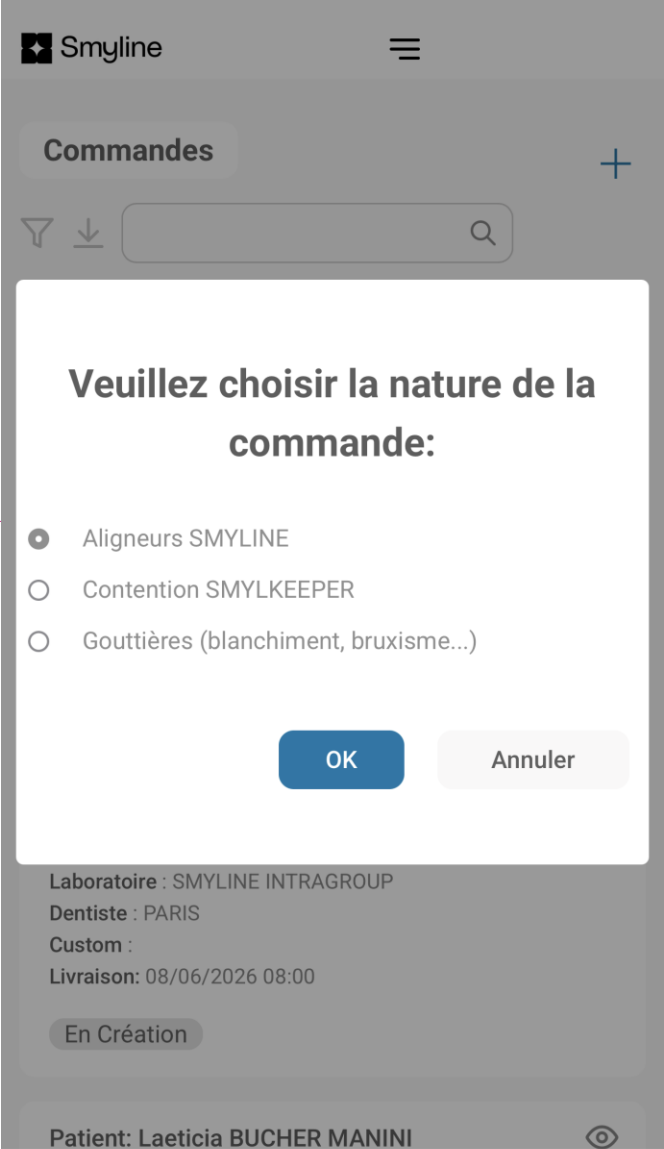

The screenshot shows the 'Commandes' (Orders) screen in the Smyline app. A modal dialog is displayed with the title 'Veuillez choisir la nature de la commande:' (Please choose the nature of the order:). The modal contains three radio button options: 'Aligneurs SMYLINE' (selected), 'Contention SMYLKEEPER', and 'Gouttières (blanchiment, bruxisme...)'. At the bottom of the modal are 'OK' and 'Annuler' (Cancel) buttons. Below the modal, the patient's information is visible: 'Laboratoire : SMYLINE INTRAGROUP', 'Dentiste : PARIS', 'Custom :', and 'Livraison: 08/06/2026 08:00'. A status bar at the bottom indicates 'En Création' (In Creation). The patient's name 'Patient: Laeticia BUCHER MANINI' is at the very bottom. A pink arrow points from the text on the left to the 'Aligneurs SMYLINE' option in the modal.

Commandes

Veuillez choisir la nature de la commande:

- ☒ Aligneurs SMYLINE
- ☐ Contention SMYLKEEPER
- ☐ Gouttières (blanchiment, bruxisme...)

OK Annuler

Laboratoire : SMYLINE INTRAGROUP
Dentiste : PARIS
Custom :
Livraison: 08/06/2026 08:00

En Création

Patient: Laeticia BUCHER MANINI

PAGE SMYLCHECK

Vous accédez alors à la page SMYLCHECK qui vous permet :

1. D'identifier ou sélectionner le patient
2. Saisir les objectifs et les contraintes du plan de traitement
3. De prendre les photos intraorales et éventuellement du sourire (directement avec votre smartphone)

Smyline

Smylcheck

Référence patient :

Recherchez ou entrez un nom pour créer un patient tem | ▾

Commentaire :

En l'absence de panoramique, veuillez impérativement préciser la position des implants, des couronnes, les limitations du plan de traitement ou tout autre prescription pertinente.

Ex: Présence d'implant, présence de couronne, limitation du plan de traitement à certaines dents, autres prescriptions pertinentes...

Veuillez charger les 5 photos intra-orales obligatoires.

Démarrer le Smylcheck

IDENTIFICATION DU PATIENT ET DEFINITION DES OBJECTIFS DU TRAITEMENT

La liste déroulante en haut de la page SMYLCHECK vous permet de sélectionner un patient s'il est déjà créé ou de le créer en saisissant son identifiant directement.

La définition des objectifs (et des contraintes) du plan de traitement permet d'orienter le plan de traitement et de conditionner son évaluation. En effet, le praticien doit préciser les prescriptions qu'il considère comme pertinentes pour l'évaluation. Par exemple :

- Restriction de zone d'alignement (ce qui est susceptible de réduire la portée du plan de traitement)
- Identification des implants (indispensable car les dents concernées ne sont pas mobiles)
- Identification des couronnes (indispensable car on évitera les taquets sur les dents concernées)

Smyline

Smylcheck

Référence patient :

ARNAUD Gilles

Commentaire :

En l'absence de panoramique, veuillez impérativement préciser la position des implants, des couronnes, les limitations du plan de traitement ou tout autre prescription pertinente.

Alignement antérieur mandibulaire 33 à 43, pas de taquets sur les couronnes 35 36 37 46 47

Veuillez charger les 5 photos intra-orales obligatoires.

Démarrer le Smylcheck

ESPACE DE PRISE DE PHOTOS


Lorsque le patient est identifié et la prescription saisie, vous devez à minima 5 photos intra-orales

- Face
- Droite
- Gauche
- Maxillaire occlusale
- Mandibulaire occlusale

En options des photos


- Sourire
- Visage
- Panoramique (*une simple photo d'écran peut suffire*)

Pour ce faire, cliquez sur chaque zone de chargement, ce qui permet d'ouvrir automatiquement l'appareil photo. Quand vous validez la photo, elle se charge directement dans l'application.

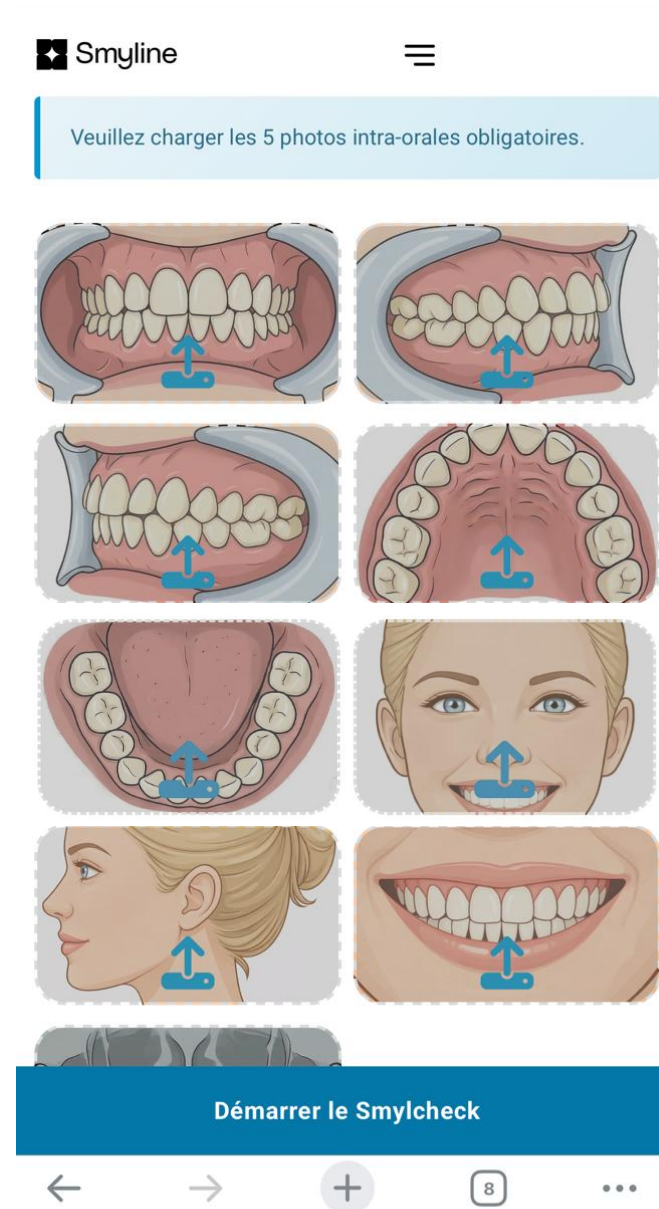

DECLENCHEMENT DU SM

Une fois les photos chargées, vous pouvez déclencher le SMYLCHECK en cliquant sur le bouton « Démarrer le SMYLCHECK ».

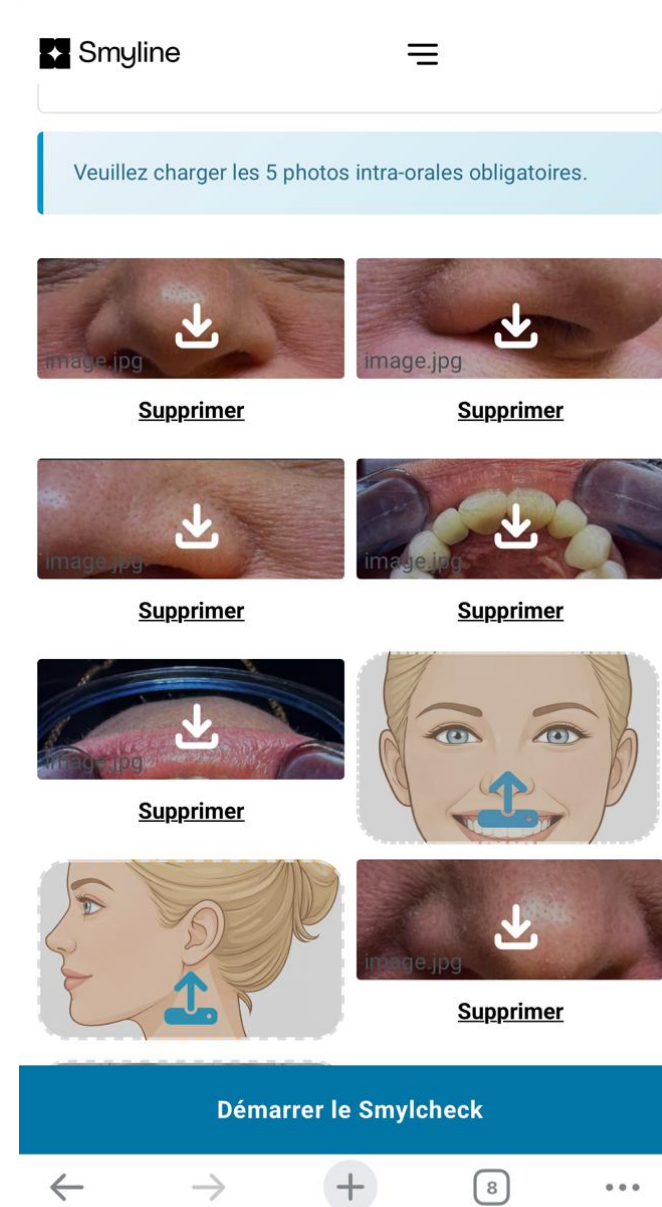

RESULTAT DU SMYLCHECK

Environ 20 secondes après le déclenchement du SMYLCHECK, l'application présente le résultat de l'évaluation sur 3 sections :

- 1) La suggestion de la formule SMYLINE avec un nombre de gouttières cibles
- 2) La recommandation d'actes complémentaires
- 3) L'évaluation de la sévérité des critères d'évaluation

Smyline

+ Proposition Smylcheck

Formule recommandée : Large

Gouttières : 28-36

Actes complémentaires : Détartrage et assainissement parodontal obligatoire en priorité → Bilan parodontal avec sondage avant traitement → Traitement orthodontique par aligneurs 33-43 → Meulage sélectif des bords libres mandibulaires en fin de traitement → Blanchiment ambulatoire des dents mandibulaires naturelles après traitement orthodontique (teinte estimée B4-C4, seuil de recommandation atteint) – NE PAS appliquer sur couronnes céramiques maxillaires → Évaluation clinique de la hauteur coronaire des incisives mandibulaires après traitement – possible couronne clinique courte (Règle 08 à confirmer par le praticien)

Encombrement maxillaire	non évalué pour le traitement
Encombrement mandibulaire	modéré à élevé
Rotations maxillaires	non évalué pour le traitement
Rotations mandibulaires	élevé
Overjet (surplomb horiz.)	léger

Accepter la proposition

← → + 8 ...

VALIDATION DU SMYLCHECK

Avant de valider le SMYLCHECK, vous pouvez consulter et télécharger le PDF du le rapport complet ou le DEVIS associé et ainsi établir la proposition financière pour votre patient.

Si votre patient accepte, il suffit de cliquer sur « Accepter la proposition ».

Dès lors, le plan de traitement peut commencer. Les étapes à venir sont les suivantes :

- Envoyez ou téléchargez les empreintes numériques,
- Envoyez ou téléchargez la panoramique (si elle n'a pas déjà été photographiée) ou le CBCT
- Les orthodontistes experts SMYLINE produisent le plan de traitement

Lorsque vous envoyez les fichiers complémentaires après avoir accepté la proposition et que nos orthodontistes vous transmettent la proposition de plan de traitement cela donne lieu à une facturation automatique de 200€ HT si le traitement était finalement abandonné. Ce montant est bien évidemment déduit du forfait commandé.

The screenshot shows the Smyline mobile app interface. At the top, there's a header with the Smyline logo and a menu icon. Below the header, there's a text box with a warning: "Orthodontique (cette étape D4-C4, seul de recommandation atteint) – NE PAS appliquer sur couronnes céramiques maxillaires → Évaluation clinique de la hauteur coronaire des incisives mandibulaires après traitement – possible couronne clinique courte (Règle 08 à confirmer par le praticien)".

Below this, there's a list of evaluation items with status indicators:

- Encombrement maxillaire: non évalué pour le traitement
- Encombrement mandibulaire: modéré à élevé
- Rotations maxillaires: non évalué pour le traitement
- Rotations mandibulaires: élevé
- Overjet (surplomb horiz.): léger
- Overbite (supraclusion): modéré
- Ligne médiane: léger à modéré
- Articulé croisé: aucun
- Espacement / diastèmes: aucun

At the bottom, there are three main action buttons:

- Voir le rapport complet → (light blue)
- ↓ Télécharger le rapport en PDF (green)
- ↓ Devis SmylCheck (PDF) (purple)
- Accepter la proposition (dark blue, highlighted with a red arrow from the text above)

The bottom of the screen shows a navigation bar with back, forward, home, and other icons.



Simple . Safe . Accessible